

# Fabulo Camino CZ elektrické lehátka



**W14114**  
**Návod k obsluze**

**Fabulo Camino Cabello**



**Fabulo Camino Russell**



**Fabulo Camino Treat**



**Fabulo Camino Infinity**

**Distributor:**

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Web: [www.fabulo.sk](http://www.fabulo.sk), E-mail: [info@fabulo.sk](mailto:info@fabulo.sk)

Tel. SK: 0948 223 550, Tel. CZ: 728 241 469

## Varování

---



**Dodržujte tato bezpečnostní opatření a zařízení používejte správně, abyste zabránili zranění, smrti a materiálním škodám.**

Nebezpečí poranění může způsobit nesprávné nastavení, provoz a nebo údržba zařízení.

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze.

Při vybalování stolu zkontrolujte výplň a čalounění. Nepoužívejte, pokud se objevují jakékoliv známky poškození. (Naše záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným nastavením, nehodou nebo zneužitím).

Toto zařízení používejte pouze k určenému účelu nebo podle popisu v tomto návodu.

Z bezpečnostních důvodů se nepokoušejte rozebírat nožní pedál, ovládací skříňku nebo poháněcí zařízení.

Neumísťujte žádné předměty pod opěrku zad nebo nohy.

Zařízení nevystavujte extrémní teplotě nebo vlhkosti.

Neumísťujte stůl na bok bez jakýchkoliv ochranných opatření, protože stoly váží až 198 liber/90 kg.

## Bezpečnostní instrukce

---

Ručně kontrolujte všechna připojení.

Neoprávněné změny nebo úpravy tohoto výrobku jsou zakázány a ruší platnost záruky.

## Prohlášení o záruce

---

3-letá záruka na rám stolu.

2-letá záruka na pěnu, vinyl a příslušenství.

Všechny záruky jsou omezeny na náhradní díly dodané výrobcem, na opravu nebo výměnu od výrobce.

Všechny záruky jsou uvedeny výše. Neexistuje žádná jiná záruka, ani záruka vyjádřená nebo implikovaná.

## Oddíl I: Specifikace

---



### Fabulo Camino Russell

Nosnost: 200 kg  
Délka: 198 cm  
Šířka: 74 cm  
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm  
Hmotnost: 68 kg

### Fabulo Camino Cabello

Nosnost: 200 kg  
Délka: 198 cm  
Šířka: 74 cm  
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm  
Hmotnost: 77 kg



### Fabulo Camino Treat

Nosnost: 200 kg  
Délka: 198 cm  
Šířka: 74 cm  
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm  
Hmotnost: 78 kg

### Fabulo Camino Infinity



Nosnost: 200 kg  
Délka: 198 cm  
Šířka: 74 cm  
Rozsah výšky: 45 cm ~ 95 cm  
Hmotnost: 72 kg





## Oddíl II: Pokyny

### Jak nastavit výšku

#### ► Ovládání nožního pedálu

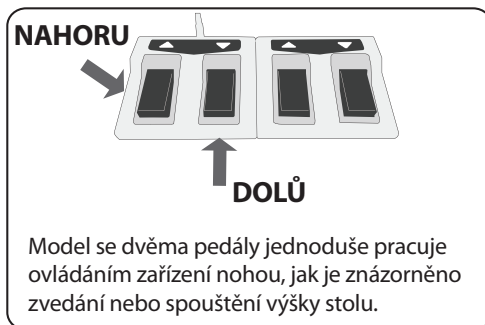
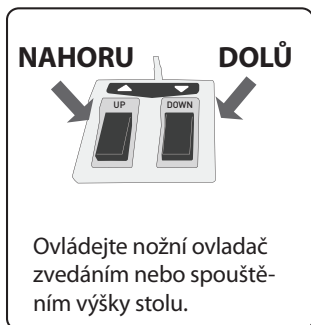


#### ► Ruční ovládání

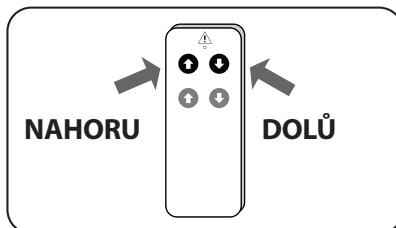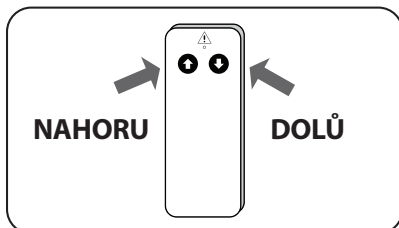

Pomocí ručního ovládání, jak je znázorněno, můžete nastavit výšku stolu. Stisknutím levé tlačítka pro zvýšení stolu. Stisknutím pravého tlačítka spustíte stůl.

#### ► Nožní ovládání

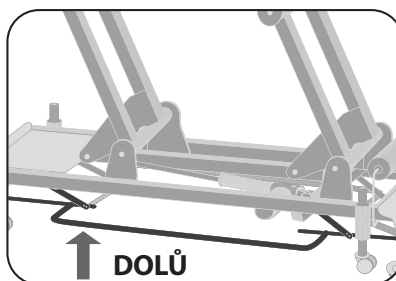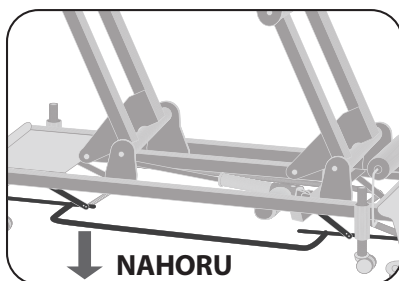


Systém nožního ovládání je velmi jednoduchý a pohodlný pro používání, jednoduché stoupnutí a stůl se zvýší. Pro spuštění stolu jednoduše regulátor nadzvedněte a stůl se spustí dolů.



## Jak nastavit pásový úsek

### ► Ovládání nožním pedálem

Ovládání pásového úseku je na pravé straně nožního ovladače, jednoduše ovládejte nožní pedál, jak je znázorněno na obrázku, zvedáte nebo spouštíte pásový úsek. Když stůl dosáhne požadované pozice, zastavte nožní ovladač.

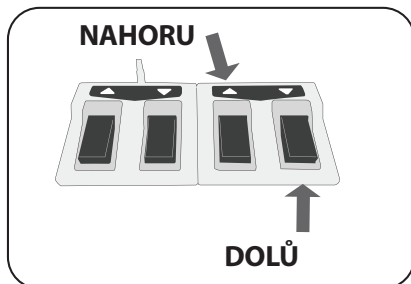


### ► Ovládání bočního panelu

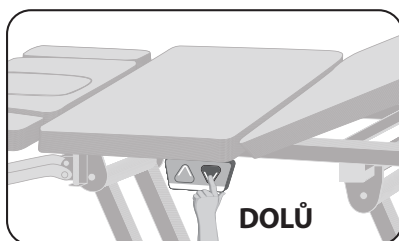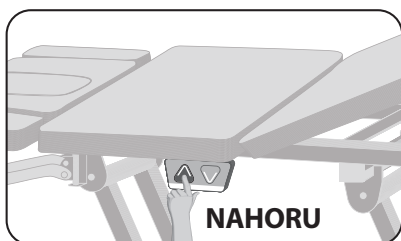

Pokud Váš produkt disponuje ovládáním bočního panelu, jednoduše stiskněte levé tlačítko, na horní straně se objeví oblouk bederní části, stiskem pravého tlačítka spustíte pásovou část.

### ► Ruční ovládání



Pomocí ručního ovladače, jak je znázorněno, upravte pozici pásové části stolu. Pro zvednutí pásové části stiskněte tlačítko vlevo. Pro spuštění pásové části stiskněte tlačítko napravo. Zastavte stlačování, když stůl dosáhne požadované pozice.

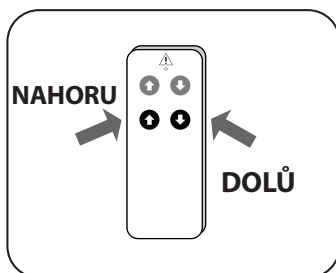

## Nastavení pneumatického systému

### ► Jak nastavit opěrku nohou a opěradlo


**!** Náš pneumatický systém, který umožňuje zvedání nebo spuštění opěrky zad nebo opěrky nohou, závisí na modelu.

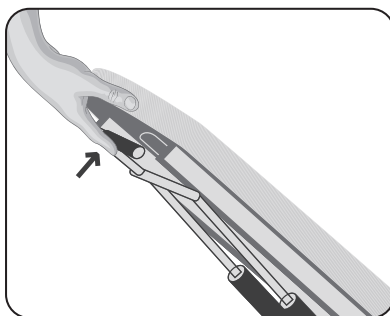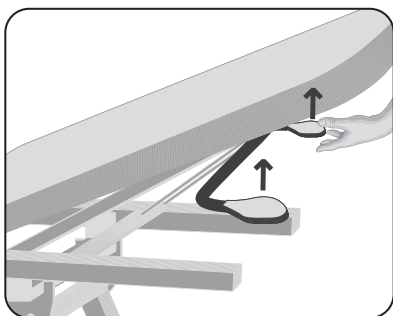

Pokud chcete nastavit úhel opěrky zad/nohou, jednoduše ji uchopte pevně a mírně potáhněte pákou směrem nahoru. Dávejte pozor, abyste pevně drželi opěrku zad/nohou při nastavování. Páku uvolníte, když máte opěrku zad/nohou na požadované úrovni a opěrka zad/nohou se automaticky zablokuje.

### ► Jak nastavit opěrku hlavy


Pro nastavení opěrky hlavy ji mírně přidrže a zatáhněte páku směrem nahoru. Nastavujte opěrku hlavy, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu, uvolněte páku a opěrka hlavy se automaticky zablokuje.

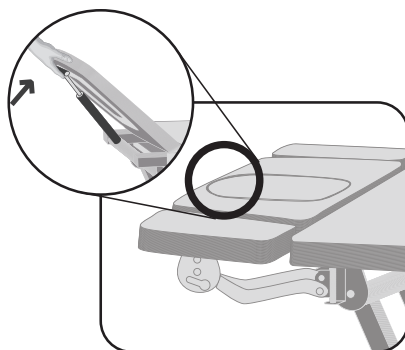

## ► Jak nastavit opěrku rukou

Pro nastavení přední opěrky ruky ji mírně přidržte a vytáhněte páku směrem nahoru. Nastavte přední opěrku ramen tak, jak potřebujete. Když dosáhnete potřebného úhlu, uvolněte páku, opěrka ruky se automaticky zablokuje v dané poloze.

**!** Pokud potřebujete pouze zvednout opěrku hlavy, není potřeba táhnout páku.

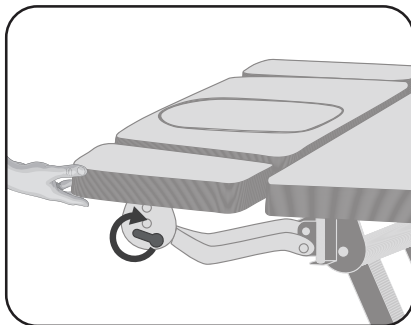

## Oddíl III: Řešení problémů

### Rychlá diagnostika:

1. Stoly, které jsou vybaveny dvojitým pohonem:

Pokud pohony nožních, ručních nebo bočních ovladačů nefungují, je možné, že ovládací skříňka je zlomená.

Jestliže jeden z pohonů nefunguje, je možné, že tento pohon je poškozen.

2. Stoly, které jsou vybaveny ručním ovládáním:



Pokud funkční kontrolka na ručním ovladači stále svítí, je možné, že ruční ovládání je pokažené.

Pokud se funkční kontrolka na ručním ovládání nerozsvítí při stisknutí tlačítka, je možné, že ruční ovládání nebo řídicí skříňka jsou rozbité.



**Před jakoukoliv prací na zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.**

## ► Návod na výměnu nožního ovladače

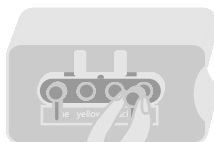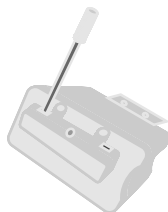


Krok 1: Odpojte napájení a odstraňte kryt z řídicí skříňky pomocí šroubováku.

Krok2: Vytáhněte rozbitou zástrčku z ovládací skříňky a zasuněte zástrčku nového nožního ovládacího.


Krok 3: Zkuste nový nožní ovladač, pokud funguje, nasadte kryt skříňky.

Zkontrolujte, zda je zásuvka napájena a kabel je zapojen na obou koncích.

Zkontrolujte ovládací skříňku, kabely ovladače a zda je nožní ovládací pevně připojeno k ovládací skříňce.

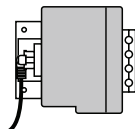


**Modrý**    **Hnědý**    **Růžový**

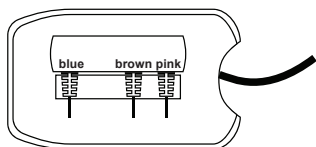

- \* Modrý port pro kontrolu výšky
- \* Hnědý port pro kontrolu hrudníkové části
- \* Růžový port pro kontrolu pádla

Pokud jsou všechny kabely správně pevně připojeny a stůl stále nefunguje, pak otevřete kryt kabelů a odpojte kabely ovladače od ovládací skříňky. Pokračujte ve stlačování nožního ovladače a měřte výstupní napětí zásuvky na řídicí skříňce pomocí multimetru. Pokud je hodnota elektroměru 29 voltů, znamená to, že servopohon je chybný a potřebujete vyměnit vadný pohon. Pokud multimeter načte 29 voltů DC, řídicí skříňka nebo pedál může být vadný.

**multimeter**

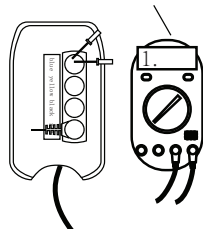

## ► Pokud zjistíte, že se pohon nemůže náhle pohnout

- Odpojte hlavní napájení.
- Zkontrolujte všechny kabely a v případě potřeby je znovu vložte.
- Odstraňte jakoukoliv hmotnost, která může být na stole.
- Nechte systém odpočívat 20 až 30 minut s odpojeným hlavním napájením.



- \* **Pokud se tím problém nevyřeší, pak ovládací panel může být vadný.**



Pokud máte jiný elektrický stůl, můžete diagnostikovat problémy prostřednictvím výměny pohonů, ovládací skříňky a nožního pedálu.

**Vezměte prosím na vědomí!** Zástrčky pro pedály jsou zaměnitelné. To znamená, že můžete nahradit pedál, který nepracuje s jiným pedálem, aby vám pomohl s diagnostikou.



**Na motorový pohon a řídicí skříňku budete mít záruku 2 roky od data nákupu. Obratě se na prodejce nebo velkoobchodníka a požádejte o nový díl, pokud stůl nefunguje po výše uvedené diagnostice.**

## Oddíl IV: Jak ošetřovat čalounění

VE SNAZE ZAJISTIT KVALITU NAŠICH VÝROBKŮ A POMOCI VÁM UDRŽET SI DLOUHOU ŽIVOTNOST VAŠEHO STOLU, JSME TESTOVALI NĚKOLIK PREVENTIVNÍCH KROKŮ, ABYCHOM VÁM PORADILI, JAK OCHRÁNIT ČALOUNĚNÍ NA STOLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Nevystavujte svůj stůl extrémně nízkým teplotám, protože nadměrné chlazení způsobuje popraskání.
- Nevystavujte svůj stůl extrémně horkým teplotám, protože nadměrné teplo způsobuje roztahování a zvrásnění čalounění. Ujistěte se, že váš stůl uchovávejte mimo ohřívače, elektrické spotřebiče a nevystavujete ho přímému slunečnímu záření.
- Chraňte svůj stůl a příslušenství plachtou a dekou.
- Doporučujeme náš třídílný Flannel Sheet Set a Fleece Sheet Set.
- V rozprašovači doporučujeme jemnou směs antibakteriálního mýdla s vodou. Nastříkejte stůl roztokem a otřete stůl čistým vlhkým ručníkem.
- Používejte oba konce stolu. Příležitostně přepínejte čelní polštář/prodloužení hlavy z jednoho konce na druhý, aby se zabránilo nerovnému použití.
- Chraňte svůj stůl před obecnými oděrkami, řezy a defekty.



- 1. Používání alkoholu způsobuje vysušení vinylového plastu a způsobí jeho praskání.**
- 2. Dlouhodobé vystavení extrémním teplotám může způsobit poškození vinylu.**