

### Princip činnosti

I když je kontaktní plocha velmi malá, síla chiropraktické pistole může proniknout do všech obratlů, které mají být korigovány, pokud je korekční poloha správná. Hlavní vlastností chiropraktického aktivátoru je rychlost, pokud je rychlost příliš nízká, odpor těla bude větší. Podle výzkumu je rezonanční frekvence páteře zezadu dopředu 30 až 50 Hz a rozsah pohybu kostí je 0,3 - 1,6 mm. Experiment dokázal, že pokud by se síla 140 N použila i v obratlích L4, může maximální pohyb obratlů 1,6 mm kosti v tomto velmi krátkém časovém období stačit k dokončení korekce. Jelikož korekce již probíhá, rychlost je nejdůležitějším faktorem účinnosti korekce. Zarovnávač přenáší sílu za 0,3 milisekundy a kost je v tomto krátkém časovém úseku korigována.


### Indikace jsou následující

1. Korekce subluxace nebo posunu kloubů horních, hrudních, bederních, dolních, kaudálních a pánevních obratlů.
2. Léčí bolesti hlavy, krku, ramen, zad, bederní oblasti a necitlivost končetin, skoliózu, herniaci disku a jiná onemocnění páteře způsobená kompresí nervů v důsledku pohybu a subluxace obratlů.
3. Zmírňuje bolest svalů, bolestivost, necitlivost a ztuhlost způsobenou subluxací nebo pohybem horních obratlů, hrudních obratlů, bederních obratlů, dolních obratlů, kaudálních obratlů a pánevních kostí.
4. Léčí bolest a nepohodlí způsobené osteofyty, revmatismem, kostními ostruhami, natažením bederních svalů atd. HA 5. Vyrovnává svalový tonus, revitalizuje šlachy a svaly a zlepšuje funkci orgánů.
5. Mikro úprava obličeje

### Podrobnosti o chiropraktickém aktivátoru:



## Jak se používá

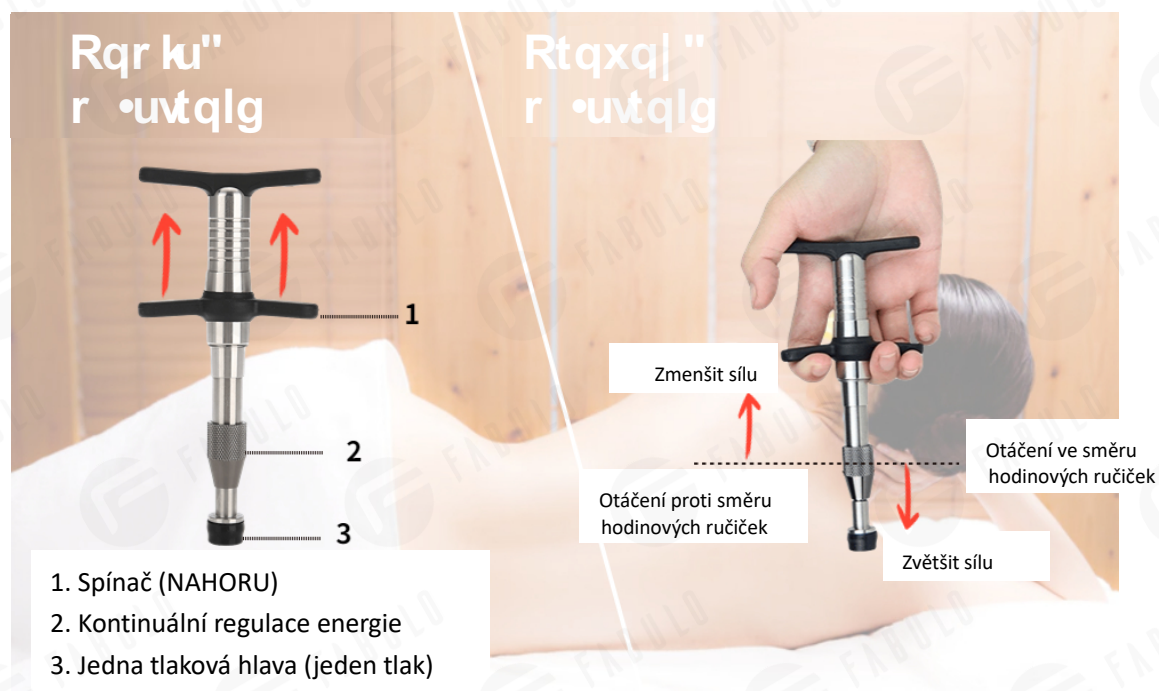

### Detaily

Produkt: Jemný chiropraktický aktivátor

Model: HLAM-AMS-003

Velikost těla pistole: 19 x 8,8 cm

Velikost vnějšího balení: 26x16x5cm

Inteligentní nastavení: Nastavení vhodné síly knoflíkem

Síla: 80N -280N

Hlavní materiál: Nerezavějící ocel

Obsah balení: Jedna hliníková krabice a jeden návod k použití

### Upozornění

1. Tento výrobek vyžaduje před použitím odborné pokyny.
2. Kontraindikace (relativní): Nezahojené zlomeniny.
3. Nádor, tuberkulóza, těžká osteoporóza.
4. Srdce se stentem nebo fixátorem.
5. Lokalizovaný zánět ve formě mokrání.
6. Přestaňte používat, pokud se po vystavení vibracím cítíte nepříjemně.

### Údržba a skladování

Při čištění nenalévejte do přístroje kapalinu, výrobek neskladujte při vysoké teplotě nebo v blízkosti zdroje ohně, přístroj je produktem speciální výroby a designu, bez potřebné dodatečné údržby, přístroj byste neměli sami rozebírat, pokud nechcete snášet následky.