



Děkujeme Vám za zakoupení našeho vysoce kvalitního masážního stolu ze série Fabulo STAR! Naše společnost neustále zdokonaluje své produkty a vyvíjí nové na základě zpětných vazeb od zákazníků. Používáme pečlivě vybrané kvalitní materiály, dbáme o důkladné zpracování našich produktů, poskytujeme poprodejní servis a také naše masážní stoly jsou za dostupné ceny, což potěší každého našeho klienta.

Distributor:

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Web: www.fabulo.cz, E-mail: info@fabulo.cz
Tel. CZ: 728 241 469

Návod k použití

elektrických masážních stolů Fabulo STAR

W12666



Obsah

Sekce I: Specifikace a fotky

Fabulo STAR Flat	05
Fabulo STAR-Liftback	05
Fabulo STAR-Deluxe	06

Sekce II: Návod

Nastavení výšky stolu	06
Nastavení opěrky zad stolů Fabulo STAR Liftback a Deluxe	07
Nastavení opěrky nohou stolu Fabulo STAR Deluxe	07
Odstranění/připevnění rovné opěrky na lokty	07
Odstranění/připevnění flexibilní opěrky na lokty	08
Používání nastavitelného podhlavníku	08
Používání přední opěrky na lokty	08
Přesouvání masážního stolu	08

Sekce III: Řešení problémů

Hlavní části elektrického systému	09
Motorový systém	09
Rychlá diagnostika	10
Návod na výměnu nožního spínače	11
Návod na výměnu ručního ovladače	11
Návod na výměnu poháněcího mechanismu	11

Část IV:

Péče o čalounění	11
------------------------	----

Figyelmeztetések:



Nesprávná instalace, provoz a údržba zařízení může vést k poranění.



Přečtěte si tento návod před začátkem užívání masážního stolu.



Zkontrolujte molitan a čalounění během rozbalování. Stůl nepoužívejte, pokud jsou přítomny náznaky poškození. (Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným rozložením či používáním stolu nebo nehodou.) Toto zařízení používejte pouze na stanovené účely nebo pro účely uvedené v tomto návodu.



Maximální nosnost (včetně klienta a příslušenství)

Nosnost stolu „Fabulo STAR Flat“: 204 kg

Zdvihová kapacita stolu „Fabulo STAR Liftback“: 196 kg

Zdvihová kapacita stolu „Fabulo STAR Deluxe“: 204 kg



Kvůli Vašemu bezpečí neodmontujte nožní spínač, ruční ovladač, řídicí jednotku a poháněcí mechanismus.



Elektrický masážní stůl držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nezdržujte se pod masážním stolem pro zamezení jakéhokoliv zranění způsobeného pádem stolu.



Nedávejte žádné předměty pod opěrku zad a nohou.



Nedávejte žádné závaží nebo nevyvíjejte tlak na podhlavník nebo další příslušenství sloužící k prodloužení stolu. Vytáhněte kabel ze zásuvky, pokud se nožní spínač dostal do kontaktu s vodou.



Nevystavujte zařízení extrémním teplotám nebo vlhkosti.



Nelehejte si na okraj stolu bez jakéhokoliv ochranného opatření, jelikož stůl váží až 91 kg.

Bezpečnostní opatření

- Připojení zkontrolujte ručně.
- Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv náznaků opotřebení majícího vliv na bezpečnost.
- Neoprávněná úprava nebo změny tohoto produktu jsou zakázány a zneplatní záruku.

Záruka

- 3-letá záruka na rám stolu a příslušenství
- 2-letá záruka na molitan a vinyl
- Všechny záruky jsou omezeny na náhradní díly poskytnuté výrobcem a na opravy či výměny provedené výrobcem.
- Všechny záruky jsou uvedeny výše. Neexistuje žádná další, vyslovená nebo skrytá záruka.

Sekce I: Specifikace a fotky

Fabulo STAR-Flat
Model: ESF



Specifikace:

Nosnost: 204 kg
Délka: 184 cm
Šířka: 71 cm, stůl dostupný i ve verzi 76 cm
Výška: 44~98 cm
Hmotnost: 65~70 kg

Model: ESL1-FA

Fabulo STAR-Liftback

Model: ESL1-LA



Specifikace:

Nosnost elektricky regulované opěrky zad: 196 kg
Délka: 184 cm
Šířka: 71 cm, stůl dostupný i ve verzi 76 cm
Výška: 44~98 cm
Hmotnost: 78 ~81 kg

Model: ESD1-FA

Fabulo STAR-Deluxe

Model: ESD1-FA



Specifikace:

Nosnost: 204 kg

Délka: 184 cm

Šířka: 71 cm, stůl dostupný i ve verzi 76 cm

Výška: 44~98 cm

Hmotnost: 88,5~91 kg

Sekce II: Návod

Nastavení výšky stolu

Pro zvýšení či snížení stolu ovládejte nožní spínač nebo ruční ovladač tak, jak je to ukázáno níže.



Stoly Fabulo STAR Flat a Fabulo STAR Deluxe jsou vybaveny jednoduchým nožním spínačem. Stiskněte spínač pro snížení nebo zvýšení stolu.



Stůl Fabulo STAR Liftback je vybaven dvojitým nožním spínačem. Pro regulování výšky stolu stiskněte nožní spínač na levé straně.



Stůl Fabulo STAR Deluxe je vybaven ručním ovladačem. Stiskněte ruční ovladač pro zvýšení nebo snížení stolu.

Nastavení opěrky zad stolů Fabulo STAR Liftback a Deluxe

Pro zvýšení či snížení opěrky zad ovládejte nožní spínač nebo ruční ovladač tak, jak je to ukázáno níže.



Nastavení opěrky nohou stolu Fabulo STAR Deluxe



Odstranění/přípevnění rovné opěrky na lokty



Boční opěrku lokte zasuňte v 30° úhlu do stolu a stiskněte ji, dokud kovový kolík zcela nezapadne do nylonového otvoru na desce stolu. Poté ji otočte směrem dolů, dokud nezůstane v rovné poloze.



Zvedněte boční opěrku do správného úhlu a vytáhněte ji. Tato funkce je užitečná zejména tehdy, když masírujete nebo pomáháte někomu dostat se na nebo ze stolu.




Ujistěte se, že konvexní tyč na kovovém kolíku se shoduje se závitem nylonového otvoru.

Odstranění/přípevnění flexibilní opěrky na lokty



Ohněte flexibilní boční opěrku oběma rukama tak, aby kovové kolíky zapadly do nylonových otvorů na desce stolu. Poté stiskněte boční opěrky, dokud se kovové kolíky zcela nevejdou do nylonových otvorů na boční straně desky stolu.

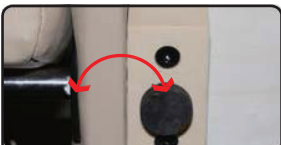

Otočením knoflíku (viz. výše) nastavíte blízkost opěrky na lokty.



Zatlačte flexibilní opěrku loktů oběma rukama a vytáhněte ji.



POZOR

Nesedejte na boční opěrky!
Neumísťujte závaží na boční opěrky!

Používání nastavitelného podhlavníku

Zastrčte kovové kolíky podhlavníku do otvorů na konci stolu.



Umístěte páku tak, aby byla ve vodorovné poloze jako hrana desky.

Upravte podhlavník, pokud je to nutné, a potom páku otočte směrem dolů, aby zapadla do svého místa.



Používání přední opěrky na lokty



Navlečte na kovové kolíky podhlavníku smyčky přední opěrky na lokty.




Připojte podhlavník ke stolu a položte popruh se suchým zipem na vrch podhlavníku.



Umístěte polštář na podhlavník.

Stoly Fabulo STAR-Flat / Fabulo STAR- Liftback / Fabulo STAR-Deluxe jsou vybaveny dvěma kolečky s brzdou na každé straně.

Přesouvání masážního stolu

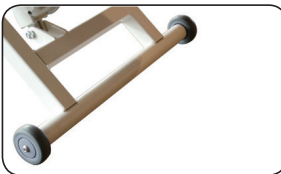

Jakmile budete mít stůl na požadovaném místě, protiskluzové gumové nožičky stabilizují masážní stůl a zajistí, aby se neposouval. Při přesouvání masážního stolu zvedněte protiskluzové gumové nožičky a přetáhněte stůl na požadované místo.

Sekce III: Řešení problémů

Hlavní části elektrického systému:



Řídicí jednotka
Číslo položky: W10795



Jednoduchý nožní spínač
Číslo položky: W11402



Dvojitý nožní spínač
Číslo položky: W11404



Ruční ovladač
Číslo položky: W11385



Napájecí kabel
Číslo položky: W04433



Poháněcí mechanismus
opěrky nohou
Číslo položky: W11374




Poháněcí mechanismus
opěrky zad
Číslo položky: W11376



Zvedací jednotka
desky stolu
Číslo položky: W10793

Motorový systém

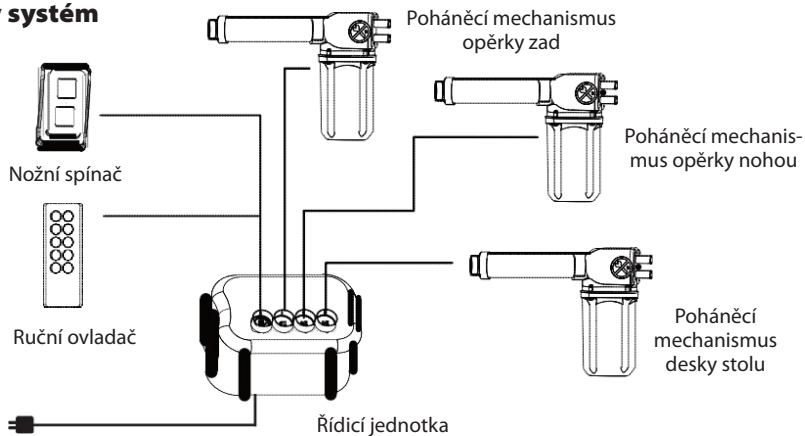

Pokud zjistíte jakýkoliv problém stolu, zkontrolujte připojení jednotlivých částí podle následujících obrázků.

Rychlá diagnóza:

1. Stoly se dvěma nebo třemi poháněcími mechanismy: Pokud ani jeden z poháněcích mechanismů nefunguje během regulování nožním spínačem nebo ručním ovladačem, je možné, že řídicí jednotka je zkažená. Pokud pouze jeden z poháněcích mechanismů nefunguje, pravděpodobně ten je zkažený.
2. Stoly vybavené ručním ovladačem: Pokud funkce LED svítí nepřetržitě na ručním ovladači, je možné, že ruční ovladač je zkažený. Pokud stisknete tlačítko a funkce LED nesvítí na ručním ovladači, je pravděpodobné, že je zkažený ruční ovladač nebo řídicí jednotka.

Pokud problém Vašeho stolu není uveden výše, postupujte podle následujících kroků.

Krok 1:

- Zkontrolujte zásuvku, abyste se přesvědčili, že je v ní elektrický proud a že kabel je připojen na obou koncích.



- Zkontrolujte řídicí jednotku, abyste se přesvědčili, že poháněcí mechanismus, nožní spínač a ruční ovladač jsou připojeni k řídicí jednotce.



Fabulo STAR Flat



Fabulo STAR Liftback



Fabulo STAR Deluxe

Krok 2:

- Výsledek: Pokud jsou všechny kabely správně připojeny a stůl stále nefunguje, přejděte na krok č. 2.
- Otevřete kryt stíněného kabelu a odpojte kabely poháněcího mechanismu od řídicí jednotky. Mějte nadále stlačený nožní spínač nebo příslušný knoflík na ručním ovladači a změřte výstupní napětí zásuvky řídicí jednotky pomocí multimetru. Multimetr by měl ukazovat 29 v stejnosměrného proudu.



Kromě toho:

1. Pokud zjistíte, že poháněcím mechanismem najednou nemůžete opěrky regulovat,
 - odpojte hlavní napájení.
 - zkontrolujte všechny kabely a znovu je připojte. Pokud je to nutné, věnujte pozornost svíčkám připojeným k řídicí jednotce.
 - odstraňte jakékoliv závaží, které může být na stole.
 - nechte zařízení stát 20 až 30 minut tak, že je odpojeno od elektrického proudu. Pokud se problém nevyřeší, pak je řídicí jednotka zkažená.
2. Pokud máte další elektrický masážní stůl, problémy můžete diagnostikovat výměnou poháněcích mechanismů, řídicí jednotky, nožního spínače nebo ručního ovladače. Nezapomeňte, že svíčky jednoduchého/dvojitého nožního spínače a ručního ovladače jsou zaměnitelné. To znamená, že nefungující nožní spínač nebo ruční ovladač můžete nahradit dalším ručním ovladačem nebo nožním spínačem, abyste problém mohli diagnostikovat.

Uvědomte si: Máte 2-letou záruku na pohon motoru a řídicí jednotku plynoucí ode dne nákupu. Prosíme, kontaktujte prodejce nebo distributora, aby požádal o nový výměnný díl, pokud stůl po výše uvedených diagnostikách stále nefunguje.

Návod na výměnu nožního spínače

POZOR: Vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky před provedením jakékoliv práce na jednotce.



Krok 1: Odpojte napájecí kabel a potom sejměte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.

Krok 2: Vytáhněte přípojku zkaženého nožního spínače ze zásuvky a zasuňte přípojku nového nožního spínače.

Krok 3: Vyzkoušejte nový nožní spínač a pokud funguje, vyměňte stínicí kryt.

Návod na výměnu ručního ovladače



Krok 1: Otevřete plastovou závoru a odpojte přípojku starého ručního ovladače.

Krok 2: Nainstalujte novou přípojku ručního ovladače do zásuvky a uzavřete závoru.

Návod na výměnu motoru

Pozor: Otočte stůl na stranu před odstraněním a výměnou poháněcího mechanismu.

Pozor: Poháněcí mechanismus podporuje plnou váhu stolu a stůl spadne, pokud poháněcí mechanismus je odstraněn.


Krok 1: Vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a opatrně otočte stůl na stranu. Kvůli bezpečí jsou potřeba k otočení stolu na stranu dvě osoby.

Krok 2: Povolte a odstraňte spojovací šrouby a matice z obou stran poháněcího mechanismu. Odstraňte zkažený poháněcí mechanismus a nainstalujte nový.

Krok 3: Sundejte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.

Krok 4: Vytáhněte přípojku zkaženého poháněcího mechanismu a zasuňte přípojku nového poháněcího mechanismu, pak nasadte kryt zpět.

Uvědomte si: Jestliže měníte zkažený poháněcí mechanismus sloužící pro zvýšení a snížení stolu, musíte odstranit řídicí jednotku, která je připojena k poháněcímu mechanismu.

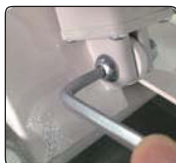

Výměna řídicí jednotky

Řídicí jednotka je namontována na spodní část stolu nebo na poháněcí mechanismus opěrky zad.

Krok 1: Sejměte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.

Krok 2: Vytáhněte všechny kabely nožního spínače nebo ručního ovladače z řídicí jednotky.



Krok 3: Oddělte řídicí jednotku od stolu:

V případě řídicí jednotky namontované na spodní část stolu (Fabulo STAR Flat a Liftback), nejprve budete muset odstranit všechny šrouby spojující řídicí jednotku a stůl pomocí šroubováku. V případě řídicí jednotky montované na poháněcí mechanismus (Fabulo STAR Deluxe), podržte řídicí jednotku a posuňte ve směru, jak je znázorněno na obrázku výše, dokud řídicí jednotka není kompletně odpojena od poháněcího mechanismu.

Krok 4: Sundejte kryt řídicí jednotky pomocí plochého šroubováku.

Krok 5: Odpojte napájecí kabel od řídicí jednotky.

Krok 6: Nainstalujte novou řídicí jednotku podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí.



Část IV: Péče o čalounění

- Ve snaze zajistit kvalitu výrobků a prodloužit jejich životnost, jsme testovali několik preventivních kroků, abychom Vám mohli co nejlépe poradit, jak chránit čalounění stolu a příslušenství.
- Neskladujte stůl při extrémně nízkých teplotách, protože může dojít k popraskání čalounění.
- Neskladujte stůl v extrémně vysokých teplotách, protože může dojít k roztažení a pomačkání čalounění. Stůl nepoužívejte v blízkosti topidel, elektrických spotřebičů a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
- Chraňte stůl a příslušenství plachtou a příkrývkou.
- Doporučujeme náš třídílný set flanelových plachet a set plachet z ovčí vlny.
- Čalounění čistěte pravidelně! Doporučujeme čištění jemným čistícím roztokem, který ochrání stůl před olejovými skvrnami a špínou, které mohou působit popraskání či trvalé skvrny.
- Doporučujeme jemnou antibakteriální mýdlovou vodu v lahvi s rozprašovačem. postříkejte stůl roztokem a otřete čistým vlhkým hadrem.
- Používejte oba konce stolu. Aby nedošlo k nerovnoměrnému používání, podhlavník občas připojte k druhému konci stolu.
- Chraňte stůl před odřenými, řezy a propíchnutím.



1. Alkohol vysušuje vinyl a způsobuje prasknutí.
2. Dlouhodobé vystavení extrémním teplotám může způsobit poškození vinylu.