

Kosmetický ozonizér a ultrazvuk Elegante 872

M-872



Představení ultrazvukového provozu

Účel: zlepšit krevní oběh, zvýšit metabolismus kožní tkáně a udělat pokožku lesklou a elastickou

Úvod do provozu	
Příslušenství	Jedna oční sonda, jedna obličejová sonda
Způsob provozu	1. Po vyčištění pleti naneste na pleť přiměřené množství přípravku, upravte intenzitu výkonu a krouživými pohyby po pokožce pohybujte. Provozní doba zpravidla není delší než 15 minut.
Bezpečnostní opatření	Před použitím přístroje očistěte pokožku místa fyzioterapie, aby se zabránilo vniknutí nečistot do kůže pomocí ultrazvuku nebo omezení průniku ultrazvuku. 2. Použité médium má přednostně určitou viskozitu, která je příznivá pro lepší spojení ultrazvukových vln a pokožky, přičemž brání dutinám, aby způsobovaly odraz a omezovaly absorpci pokožkou. 3. Každá fáze fyzikální terapie obvykle trvá 15 minut, příliš dlouhá doba nebo nesprávné použití může způsobit špatnou absorpci pokožkou. 4. Tepelný stupeň sondy neznamená výstup ultrazvukového výkonu; malá koncentrace vodního činidla nebo léčiva by neměla být přímo infiltrována, jinak to snadno způsobí vysušení pokožky.

Představení provozu elektroléčby

Účel: urychlit hojení kožních ran provedením sterilizace ozonem a snížením zánětu na kůži s vyrážkami nebo jinými problémy

Úvod do provozu	
Příslušenství	elektroléčebná tyčinka s jednou hadičkou ve tvaru hada, jednou hřibovou rourkou, jednou zakřivenou rourkou
Způsob provozu	1. Vložte vodič do držáku vodiče. 2. V závislosti na ošetřovaném místě vložte do elektroterapeutické tyče různé tvary skleněných trubic. 3. Zapněte napájení a nastavte ovladač intenzity tak, aby fungoval. 4. Nejprve po použití vraťte knoflík intenzity na nulu a po vypnutí napájení vytáhněte skleněnou trubici.
Bezpečnostní opatření	1. UV skleněná trubice by měla být vždy čistá a suchá. 2. Při provádění elektroterapie by se neměla příliš dlouho zdržovat na stejném místě, aby se předešlo zjizvení. 3. Před ošetřením nenoste kovové šperky

Bezpečnostní opatření

Před použitím si zapamatujte tyto pokyny a způsob provozu.

- Pokud se během používání cítíte nepříjemně nebo zjistíte něco neobvyklého, okamžitě vypněte napájení a přestaňte ho používat.
- Prosím, nepoužívejte ho u kojenců a umístěte ho na místa, která nejsou pro kojence snadno dostupná.
- Výrobek nesmí rozebírat a upravovat nikdo, kromě našeho technického personálu.
- Po použití vždy vytáhněte zástrčku
- Neuchovávejte ho na následujících místech.
 - ① Místa, která jsou snadno dostupná větru, dešti a místa, kde se snadno hromadí voda.
 - ② Místa, kde se používá oheň, jiná místa s vysokou teplotou
 - ③ Vlhká a prašná místa
- Nepoškozujte napájecí kabel, ani ho neupravujte. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě ho vyměňte.
- Při používání dodržujte předepsané napětí přístroje. Jinak to může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

- Voda vnikající do ovládacího panelu produktu může způsobit zásah elektrickým proudem a zkrat. Okamžitě ho přestaňte používat a kontaktujte odborníka, aby ho zkontroloval.
 - Když se nepoužívá, nejprve vypněte hlavní jednotku a poté vypněte napájení. Ujistěte se, že jste vytáhli zástrčku. Zároveň vyčistěte příslušenství.
 - Když ho začnete používat, nenastavujte příliš vysokou intenzitu. Používejte ho od nízké intenzity.
 - Pokud kůže zčervená nebo svědí, přestaňte ho používat, abyste zjistili příčinu.
- ① Aby nedošlo k poškození přístroje, není dovoleno do něj tlouci, nebo ho nechat silně spadnout na podlahu.
 - ② Při používání přístroje se příslušenství nesmí nacházet příliš blízko oka ani nesmí procházet přes oční bulvu. Těhotné ženy a pacienti se srdečním onemocněním přístroj používat nesmí

Distribútor: iM3, s.r.o., Malotejedská 515/8, 92901 Dunajská Streda, Slovensko www.fabulo.cz