

## Upozornění

1. Pokud chcete tento přístroj přesunout, je potřeba ho jemně zvednout a opatrně ho položit; v případě selhání na něj, prosím, tvrdě neklepejte, abyste předešli poruše způsobené dopadem.
2. Pokud chcete tento nástroj přesunout, je potřeba ho držet horizontálně, aby se zabránilo vibracím a nárazům.
3. Nemačkejte přístroj ani neumisťujte těžké věci na přístroj, aby se zabránilo deformaci pouzdra, poškození nebo poruše.
4. Je potřeba zvolit odpovídající pracovní napájení v souladu se značkami na tělese přístroje.
5. Tento nástroj se nesmí používat v koupelně.
6. Abyste zabránili nehodě zásahem blesku, když hřmí, vypněte vypínač napájení a vytáhněte síťovou zástrčku.
7. Není dovoleno vstříkovat jakoukoliv tekutinu do tělesa přístroje, aby se zabránilo poškození přístroje v důsledku zkratu.
8. Pokud se přístroj nebude používat delší dobu, je potřeba vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.

## Technické parametry

1. Provozní napětí: AC 220V--AC 240V
2. Maximální výkon celého přístroje: 25W
3. Velikost balení: 26.5 \*14\*22.5 (D\*V\*Š) cm

# SMART 671

## Kosmetický přístroj

### Uživatelská příručka



Vážení zákazníci,  
děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Projděte si, prosím, tuto příručku před použitím, abyste zajistili maximální výkon přístroje a bezpečnost při používání. Vhodně uchovejte pro další využití.

## Funkce

### ※ Ozonizér

1. Během ošetření se uvolňují částičky ozonu - ten dezinfikuje a stimuluje pokožku.
2. Zbavte se skvrn, pigmentace, vyrážek a akné.


### ※ Galvanizace

1. Důkladně se zbavte veškeré špíny, nečistot, tuku z hlubokých pórů kůže.
2. Vyživuje pokožku a zlepšuje stav pokožky.

## Specifikace

1. Jednoduchý a rychlý provoz použitím nejnovější mikro počítačové technologie.
2. Inteligentní a spolehlivá léčba použitím 10 nastavitelných úrovní.
3. Různé metody, které jsou k dispozici použitím pulzní vlny.

## Popis ovládacího panelu

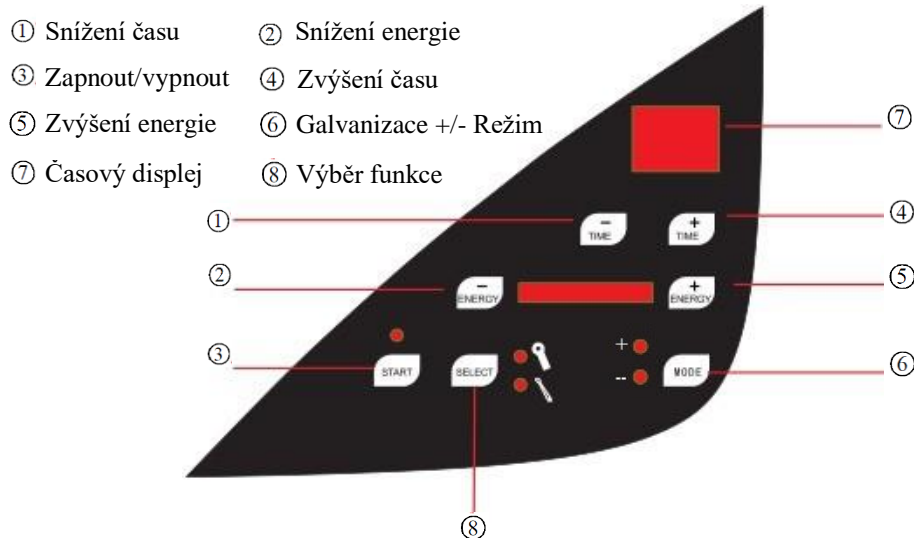

## Provoz

### ※ Ozonizér

1. Energie by neměla být příliš vysoká, aby se zabránilo jakémukoliv zranění, ani ne příliš nízká, kvůli oslabení výsledku léčby.
2. Na odstranění skvrny musíte elektrodu přesunout na skvrnu, potom uvidíte ubývající melanin. Drobné skvrny lze odstranit po jedné léčbě a na větší budou potřeba 2-3 léčby.

### ※ Galvanizace

1. Vložte zápornou kovovou tyč do ruky klienta.
2. Použijte vhodnou ampulku na kůži klienta schopnou disociace iontů. Potom gázou dostatečně navlhčete obličej vodou, abyste mohli provést iontoforézu. (Navlhčená gáza zůstane na obličejí klienta během léčby)
3. Umístěte galvanizační elektrodu na čelo klienta:
4. Stiskněte tlačítko ⑥ a vyberte “+” pro odvedení / “-” pro přivedení
5. Zvyšte / snižte energii na 10 úrovních pomalým stisknutím tlačítka ⑤ / ②, doba léčby asi 4-6 minut.
6. Po léčbě vypněte napájení a odeberte galvanickou hlavu od klienta.

### ※ Provoz

1. Zapojte do zásuvky, ⑦ se zobrazí jako 30 (minut) a bliká druhá tečka
2. Pro výběr funkce Vysoká frekvence / Galvanizace stiskněte ⑧
3. Stisknutím tlačítka ① / ④ nastavte dobu provozu
4. Stiskněte ⑤ / ② pro nastavení energie.
5. Tlačítkem vyberte “+” pro odvedení / “-” pouze pro přivedení, když je zapnutá galvanizace.

## Poznámky

1. Pokud kosmetik provádí zákrok sterilizovanými rukavicemi, ruce by se měly nejprve vyčistit a dezinfikovat alkoholem
2. Elektrody by měly být sterilizovány, udržovány čisté a suché a připevněny na rukojeti
3. Před léčbou dezinfikujte léčenou část těla klienta alkoholem
4. Potírejte tuto část anestetikem po dobu 3 minut, a potom začněte léčbu
5. Během operace nezůstávejte příliš dlouho na ošetřované oblasti, abyste se vyhnuli jizvám
6. Před operací si sundejte všechny kovové části (náušnice, náhrdelník atd.)