



## Kosmetický přístroj 5v1 Elegante 1897

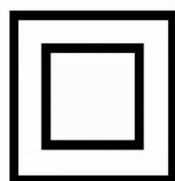

CE

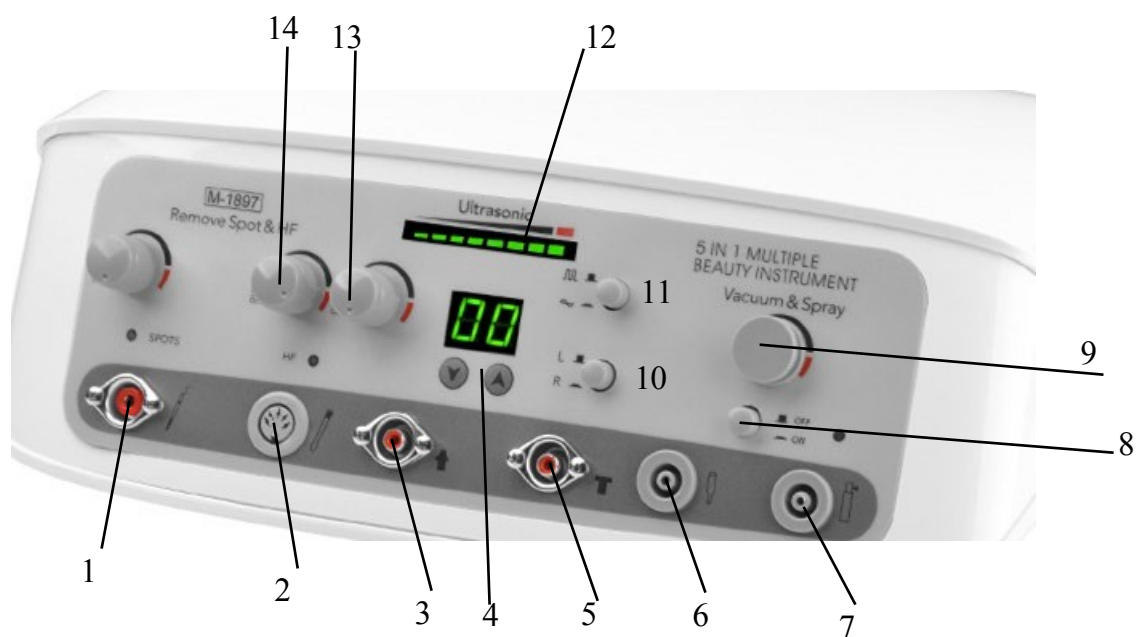

- ☐ Připojení elektrokoagulace,
- ☐ Darsonvala spojení,
- ☐ Připojení hlavy k ultrazvuku,
- ☐ Nastavení času,
- ☐ Připojení hlavy k ultrazvuku,
- ☐ Vakuová jednotka a připojení mikrodermabraze,
- ☐ Připojení postřiku,
- ☐ Zapnutí/vypnutí vakuové jednotky a mikrodermabraze,
- ☐ Nastavení sacího výkonu,
- ☐ Výběr ultrazvukové hlavice,
- ☐ Výběr ultrazvukové vlny pro léčbu,
- ☐ Zobrazení intenzity ultrazvuku,
- ☐ Nastavení intenzity ultrazvuku,
- ☐ Nastavení intenzity Darsonval.

## DARSONVAL

D'Arsonvalovy proudy jsou jednou z forem vysokofrekvenčních proudů. Přístroj generuje ozon pomocí elektrostatických výbojů, které vznikají v elektrodách (peletách).

Účinek d'Arsonvalových proudů je založen především na působení na cévy a autonomní nervová zakončení. Jiskření, ke kterému dochází mezi elektrodou a kůží, způsobuje rozšíření cév a ovlivňuje podkožní tkáň.

Vznikající ozon má dezinfekční účinek.

Ošetření trvá 5 až 7 minut.

**Indikace:**

- Poruchy projasnění kůže,
- Alopecie areata (pásový opar),
- Stimulace krevního oběhu,
- Dezinfekce kůže.

---

**ULTRAZVUK**

Jedná se o systém transportu účinných látek do hlubších vrstev pokožky. Přístroj využívá fyzikálního jevu, který probíhá v buněčných membránách pod vlivem ultrazvuku - díky tomu účinek jednoho ošetření přetrvává v pokožce až 72 hodin.

Ošetření je zcela bezbolestné, klient může cítit jemné vibrace vycházející z přístroje. hlava.

---

**SPRAY**

Používá se k jemnému tonizování pleti pomocí vakua a tonika umístěného v nádobě.

---

**MIKRODERMABRAZE**

Jedná se o ošetření, při kterém se pomocí diamantových abrazivních hlavic a sacího výkonu odstraňují povrchové vrstvy kůže.

Mikrodermabrazie účinně redukuje jemné linky, vrásky kolem očí (tzv. "vrásky"), pigmentové skvrny a jizvy po akné. Stimuluje tvorbu kožních buněk a kolagenu.

Jedná se o velmi oblíbený neinvazivní kosmetický zákrok. Při pravidelném používání přináší vynikající výsledky pro všechny typy pleti. Výsledky jsou viditelné okamžitě.

**Indikace:**

- Jizvy po akné,
- Komedony (černé tečky), milia (bílé tečky),
- Rozšířené póry,
- Drsná, zkorodovaná kůže,
- Ztráta pevnosti pokožky,
- Omlazuje pleť a odstraňuje jemné vrásky kolem očí, úst a krku,
- Strie,
- Suchost kůže,
- Pigmentové skvrny a depigmentace,
- Poškození pokožky (obličej, ruce, krk) sluncem,
- Keratóza kolem vlasových folikulů,



**Kontraindikace**

- Virové infekce,
- Bakteriální infekce,
- Plísňové infekce,
- Hnisavé a zánětlivé akné,
- Rosacea (růžovka),
- Kůže očních víček,

- Porušená kontinuita kůže (otevřené rány),
- Kožní nádory a mateřská znaménka,
- Hemangiomy (kavernózní cévní nádory),
- Léčba akné přípravkem Roaccutane (doporučuje se minimálně tříměsíční přestávka),
- Sklon k tvorbě keloidních jizev,
- Chirurgické zákroky v oblasti obličeje (doporučuje se minimálně dvouměsíční přestávka).

#### Varování:

- Mikrodermabrazie musí být čistá a dezinfikovaná.
- Ošetření se provádí na suchou pokožku.
- Bavlněné filtry pro mikrodermabrazi jsou určeny k jednorázovému použití.
- Pohyby hlavy během zákroku musí být plynulé a kontrolované.

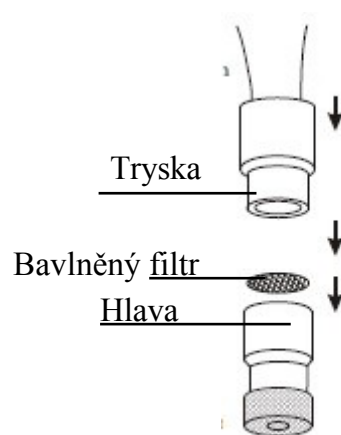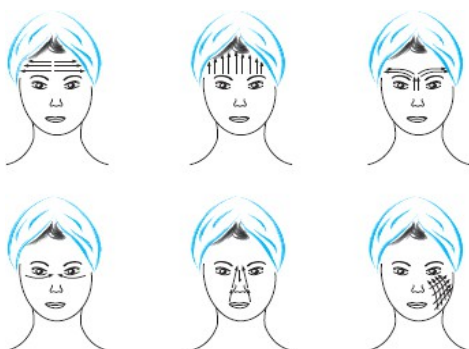

#### Vakuum

Jedná se o ošetření, které využívá sací sílu a vhodně zvolené nástavce podle ošetřované oblasti.

#### Indikace:

- Komedony (černé tečky)
- Rozšířené póry,
- Ztráta pevnosti pokožky,
- Strie
- Suchost kůže.



#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení určené pro použití v kosmetických salonech. Obsluhovat jej může pouze kvalifikovaný kosmetický personál, což pomáhá předcházet nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Zařízení se nesmí rozebírat ani používat k jiným účelům, než je uvedeno v této uživatelské příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik .
3. Přístroj nesmí být instalován nebo provozován v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se kapalina nedostala dovnitř přístroje.

4. V následujících případech je nutné přístroj okamžitě odpojit od elektrické sítě a kontaktovat výrobce.  
autorizovaný servis
    - a) kapalina se dostala do zařízení,
    - b) spotřebič vydává neobvyklé pachy, kouř nebo zvuky,
    - c) je poškozený napájecí kabel,
    - d) zařízení spadlo nebo je poškozen jeho kryt.
  5. Na kabely se nesmí pokládat žádné předměty. Zařízení nesmí být instalováno na místech, kde by mohlo dojít k přiskřípnutí napájecího kabelu.
  6. Z bezpečnostních důvodů musí být napájecí kabel po každém použití odpojen ze zásuvky.
  7. Do otvorů v zařízení se nesmí nic vkládat. Pokud do otvoru vnikne cizí předmět, je nutné kabel okamžitě vytáhnout ze zásuvky a kontaktovat distributora nebo výrobce.
  8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo pohyblivém stojanu. Při pádu by mohlo dojít k jeho poškození.
  9. Pro zajištění předpokládané životnosti zařízení se doporučuje dodržovat interval nejméně jednoho roku.  
minut mezi zapnutím a vypnutím zařízení (a naopak).
  10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikaci uvedené na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávného provozu, poškození nebo dokonce popálení zařízení.
- 

#### UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiné poruchy se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
  2. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
  3. Zařízení není určeno pro hraní dětí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
  4. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dozoru. dostatečné znalosti o jeho použití.
  5. Toto elektrické zařízení není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s přístrojem může způsobit ohrožení zdraví nebo života - proto musí být přístroj používán a uchováván mimo dosah dětí.
- 

#### LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Použitá elektrická zařízení, příslušenství a obaly musí být odevzdány do sběrných míst k recyklaci v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrozařízení se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Je třeba dodržovat platné předpisy týkající se likvidace tohoto typu zařízení.

V zájmu ochrany životního prostředí je v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních nutné stará zařízení sbírat odděleně a následně je odevzdat na sběrných místech elektronického odpadu.

I po skončení životnosti zařízení obsahuje součásti vhodné k recyklaci a mělo by být odevzdáno na recyklační místo.

---

#### SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od -20 °C do +50 °C pouze v původním obalu.

Měl by být skladován na dobře větraném místě s relativní vlhkostí nepřesahující 75 %. Provozní teplota se pohybuje mezi +10 °C a +40 °C.

Během skladování a přepravy nesmí zařízení spadnout, být upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo nepříznivým povětrnostním podmínkám.