

# Návod na použitie k patentovým Therma Top™ stolom

## Master Massage

**Gratulujeme k Vašej novej investícii! Tento masážny stôl má v sebe zabudovanú špeciálnu patentovú vyhrievaciu podložku, vďaka ktorej môžete stôl zahriať na Vami zvolenú teplotu, ktorú považujete za príjemnú.**

**Pozor:** Masážny stôl nemusí byť horúci na dotyk. Jednotlivé stupne teploty boli navrhnuté tak, aby ste teplo cítili iba vtedy, ak na stole LEŽÍTE alebo SEDÍTE.

### Štart

Na zapnutie stlačte tlačidlo on/off umiestneného v strede dolnej časti ovládača, pod LCD displejom. Displej sa rozsvieti a zároveň môžete nastaviť teplotu a časovač automatického vypnutia.

### Nastavenie teploty

Tlačidlami „+“ a „-“ na ľavej strane pod označením „HEAT“ môžete nastaviť teplotu od 1 do 10. Teploty, ktoré reprezentujú jednotlivé stupne zobrazené na displeji, sú uvedené v tabuľke nižšie.

Intenzita	LCD Display	°C
1	L	37
2	2	40
3	3	42
4	4	45
5	5	47
6	6	50
7	7	52
8	8	55
9	9	57
10	H	60



### Nastavenia časovača automatického vypnutia

Tlačidlá „+“ a „-“ na pravej strane pod označením „AUTO OFF“ regulujú čas zahrievania pred tým, ako sa vyhrievacia podložka automaticky sama vypne. Predvolená doba automatického vypnutia je 1 hodina, ktorú môžete jednoducho zvýšiť alebo znížiť stlačením tlačidiel „+“ a „-“, a tak zmeniť dobu automatického vypnutia na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 hodín. Ak sa podložka raz automaticky vypne a vy ju chcete reštartovať, znovu musíte stlačiť tlačidlo on/off. Vďaka tejto funkcii sa nemusíte báť, že ste vyhrievaciu podložku zabudli zapnutú po odchode.

### Dôležité upozornenie:

Ak sa zobrazuje „F“ na LCD displeji: Skontrolujte všetky spojenia, či sú správne pospájané. Odpojte riadiacu jednotku a počkajte aspoň 20 sekúnd, kým ju znova pripojíte do elektrickej siete.