


## Postup sestavení přístroje F-833

- 1) Po vybalení jednotlivých částí demontujeme zadní kryt sloupku pomocí přiloženého šroubováku.




- 2) Pomocí přiložených šroubů a podložek připevníme sloupek k základně s kolečky.

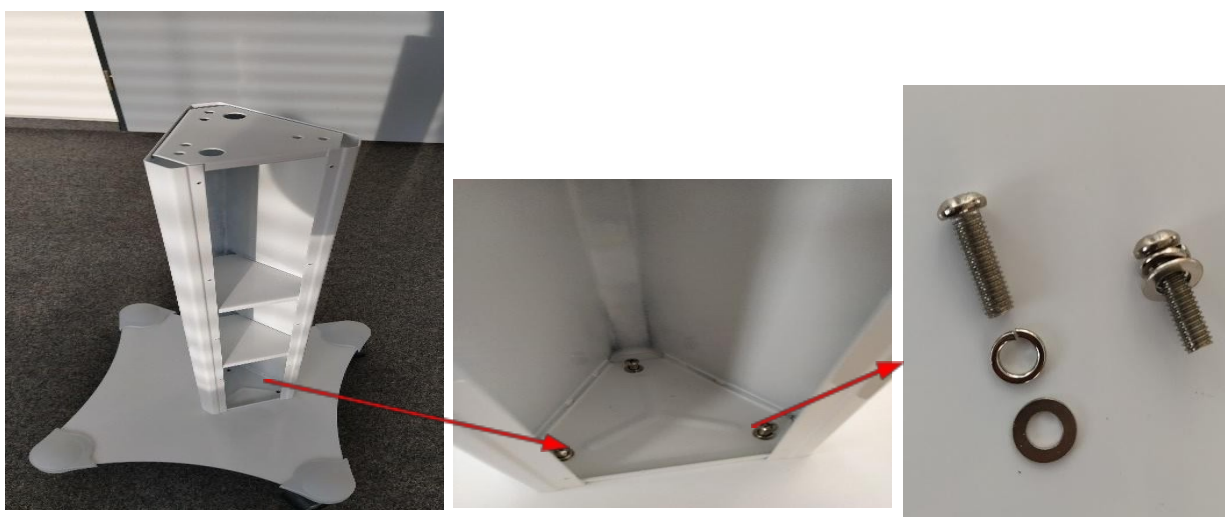

3) Gumovou podložku položíme na horní část sloupku podle výřezů.




4) Masážní přístroj položíme na gumovou podložku a k přišroubování použijeme stejné šrouby jako ve spodní části.

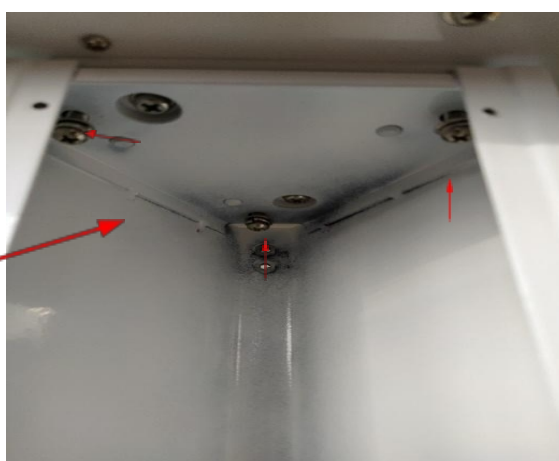

5) Držák plastové vaničky připevníme na přední stranu sloupku pomocí stejných 4 šroubů, jaké jsme používali dosud, avšak bez podložek. Po připevnění držáku vaničku pouze vložíme do rámu.



- 6) Odkládací držák připevníme na levou stranu sloupku a přístroje. Použijeme 3 šrouby, odlišné od těch, které jsme používali dosud. Pro upevnění k přístroji použijeme také podložky. Šroub, který se připevňuje do sloupku, je bez podložky.

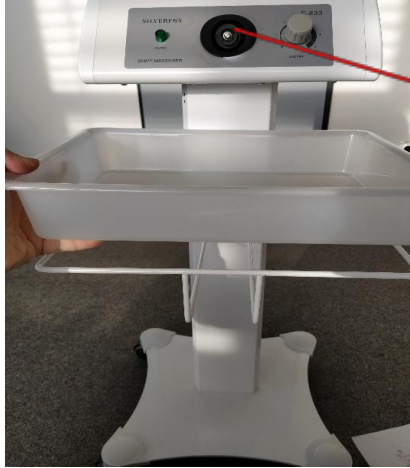

- 7) Hadici masážního přístroje připevníme pomocí imbusového klíče. Důkladně zkontrolujte, zda je zcela zasunutá a dostatečně upevněná.



8) Ochranný kryt kabelu našroubujeme na určené místo.



9) Na masážní hlavici nasadíme ochranný plastový kryt a hlavici našroubujeme na kabel.



10) Na hlavici masážního přístroje našroubujte hlavici podle toho, kterou část těla budete masírovat.



11) Po připojení k elektrické síti je přístroj připraven k použití.

