

Návod k použití

Infračervená deka Quirumed DIY110



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral z našich produktů!

Pro nejlepší využití a bezpečnost si před použitím přečtěte tento návod k použití. Tento návod k použití si, prosím, uchovejte pro pozdější nahlédnutí.

Distributor: iM3, s.r.o., Malotejedská 515/8, 92901 Dunajská Streda

Web: www.fabulo.cz

Obsah

Funkce termoterapeutické přikrývky	3
Účinky a čemu je potřeba se vyhnout	4
Řešení jednoduchých poruch	5
Technické parametry	5
Obsah balení	5
Bezpečnostní upozornění	6

Funkce termoterapeutické přikrývky



- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. hlavní část | 4. výběr menu | 6. zobrazení menu |
| 2. termot. přikrývka | provozní čas 0-60 min | 7. infračervený výstup A |
| 3. ON/OFF | teplota 40-85°C | 8. infračervený výstup B |
| | 5. nastavení menu | |

Krok 1: Rozložte přikrývku, propojte přikrývku s výstupem A a s výstupem B dvěma propojovacími vodiči.

Krok 2: Klient si lehne na termoterapeutickou přikrývku.

Krok 3: Stisknutím ON/OFF přístroj zapnete.

Krok 4: Nastavte čas mezi 0-60 minutami. Když se čas odpočítá na 0, přístroj se automaticky zastaví.

Krok 5: Nastavení teploty mezi 40-85°C. Když je ohřev zapnutý, znázorňuje skutečnou teplotu. Po dosažení nastavené teploty se ohřev zastaví a udržuje teplotu.

Pozor: Zobrazovaná teplota je teplota ohřevu, neznamená to, že je to teplota lidského těla, takže při nastavování teploty si klient musí dávat pozor, aby se nepopálil.

Krok 6: Když přístroj přestanete používat, vypněte ho stisknutím tlačítka ON/OFF.

Krok 7: Termoterapeutickou přikrývku vyčistěte a uschovávejte ji v suchu.

Účinky a čemu je potřeba se vyhnout

Účinky:

- ⊙ Rozpouští tuk: Infračervené paprsky působí přímo na tuk a pomáhají ho rozpustit díky teplotě.
- ⊙ Zmenšuje obsah tuku: Infračervené paprsky pomáhají otevřít póry a odstranit tuk přes pot.
- ⊙ Uvolnění svalstva: Tepelná energie generovaná infračervenými paprsky může snížit napětí svalů a uvolnit je.

Tipy:

1. Místo aplikace natřete krémem na snížení hmotnosti. Bude lepší, pokud tělo obalíte ochranným filmem, a potom přístroj použijete.

- a) Pokud je ošetřovaná oblast citlivá, správně snižte teplotu, aby se zabránilo popálení.
- b) Části těla, které mají vážný problém s krevním oběhem, by neměly být tímto přístrojem ošetřovány.
- c) Během aplikace by měl kosmetik pozorně sledovat reakce klientů, a ptát se na jejich pocity, aby se zabránilo přehřátí.

Čemu je potřeba se vyhnout:

Termoterapeutickou příkrývkou by neměli používat tito lidé:

- i. Lidé s onemocněním krve
- ii. Lidé s vysokou teplotou
- iii. Lidé se srdečním onemocněním
- iv. Lidé s respiračními nemocemi
- v. Těhotné ženy
- vi. Lidé s infekcemi
- vii. Lidé s různorodými duševními nebo fyzickými disfunkcemi

Řešení jednoduchých poruch

Porucha	Řešení:
Zapnuto, žádná odpověď	Zkontrolujte připojení napájení
	Zkontrolujte, zda je napájení zapnuté nebo ne
Žádný výstup	Zkontrolujte všechno příslušenství, zda je k přístroji správně připojené
Přístroj se přehřívá	Používá se příliš dlouhou dobu, přístroj je potřeba vypnout a nechat ho přirozeně vychladnout
	Zkontrolujte napětí, zda je normální nebo ne (potřebujete kontrolu odborníkem)

Technické parametry

Napájení 110V 220V 230V 240V

Frekvence 50Hz 60Hz

Celková hmotnost 6 kg

Výkon 300W

Velikost balení (cm) 31X21 5X16.5

Obsah balení

Název	Jednotka	Množství	Poznámka	
Hlavní část	Sada	1		
Termoterapeutická přikrývka	Sada	1		
Napájecí vodič	Ks	1		
Manuál	Ks	1		

Bezpečnostní upozornění

1. Přístroj je profesionální nástroj pro kosmetický salón, aby se zabránilo zbytečnému zranění, profesionální kosmetik potřebuje, aby správně fungoval.
2. Přístroj nerozebírejte ani nepoužívejte tak, jak není vysvětleno v návodu k použití. Všechny služby údržby se provádějí profesionálním technikem údržby schváleným naší společností.
3. Neinstalujte ani nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama nebo v blízkosti zdrojů vody, aby se zabránilo střikání/cákání kapaliny nad přístrojem.
4. Vytáhněte zástrčku a spojte se se servisním střediskem v následujících případech:
 - A. postříkání/pocákání přístroje kapalinou nebo byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
 - B. přístroj má zvláštní zápach, dým/smog nebo vydává abnormální hluk.
 - C. poškozené nebo poškrábané napájecí kabely.
 - D. přístroj spadl nebo se poškodil kryt.
5. Neukládejte nic na napájecí kabel ani neinstalujte přístroj na místě, kde budou jeho napájecí vodiče pošlapané.
6. Vytáhněte napájecí vodiče na konci použití kvůli bezpečnosti.
7. Do otvoru přístroje nevkládejte žádné věci; v opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V případě, že něco spadlo do otvoru, a vy jste to nemohli vyndat ven, vytáhněte napájecí kabel, spojte se s prodejcem nebo naší společností.
8. Neukládejte přístroj na nestabilní vozík, poličku nebo vozidlo, pokud spadne, přístroj se může poškodit.
9. Pokud chcete zaručit životní cyklus tohoto stroje, interval nepřetržitého zapnutí a vypnutí by měl být více než minutu.
10. Napájení musí splňovat specifikaci uvedenou na štítku, jinak přístroj nebude fungovat, nebo bude fungovat abnormálně, dokonce může shořet.
11. Společnost má právo revidovat nebo změnit tuto příručku.

Společnost si vyhrazuje všechna práva na interpretaci uvedených informací.

Upozornění:

Pokud se síťový kabel poškodí, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem, nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.