




Elektrický terapeutický stůl Fabulo Nexus

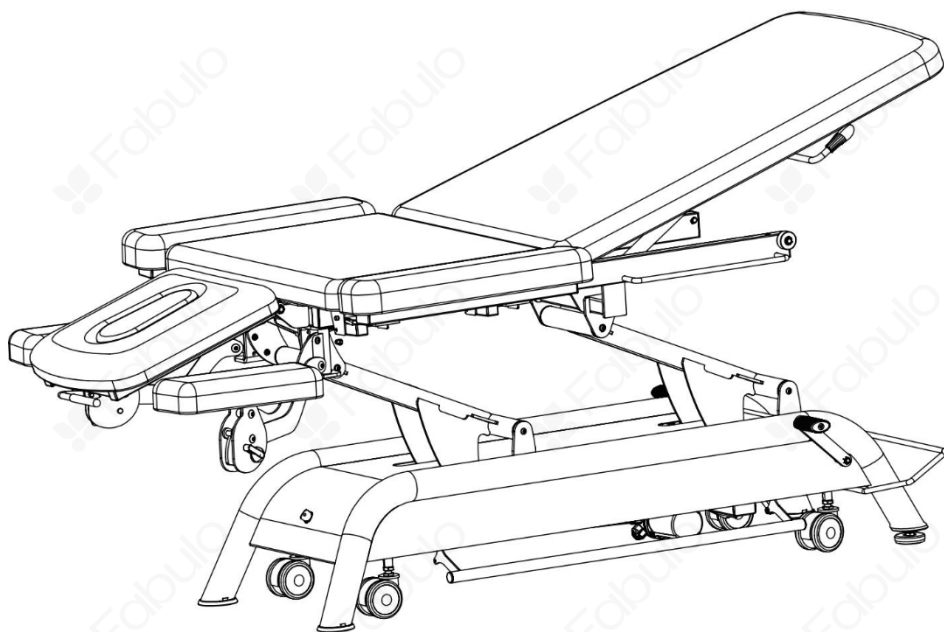




iM3 s.r.o.
Malotejedská 515/8
929 01 Dunajská Streda
Slovensko

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro

Před uvedením do provozu si prosím přečtete tento návod.

Specifikace



Fabulo Nexus XB1

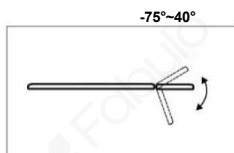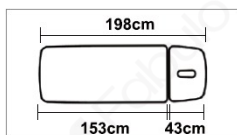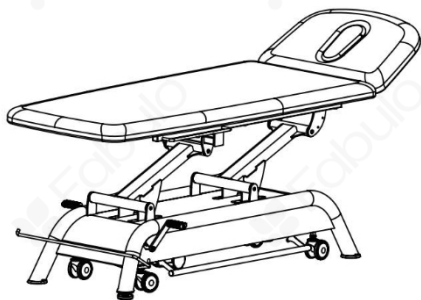

- Délka: 78"/198cm
- Šířka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37,5"/95cm
- Pěna: 2,5" / 6,5 cm pevná pěna s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavení opěrky hlavy: -75°~40°
- Pracovní kapacita: 440lbs/ 200kg

CZ

Fabulo Nexus XC1

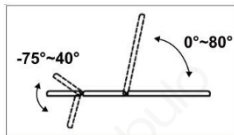
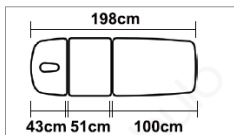


- Délka: 78"/198cm
- Šířka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37,5"/95cm
- Pěna: 2,5" / 6,5 cm Pevná pěna s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavení opěrky hlavy: -75°~40°
- Pneumatické nastavení opěradla: 0~80°.
- Pracovní kapacita: 440 liber / 200 kg

Specifikace:



CZ

Fabulo Nexus XF3

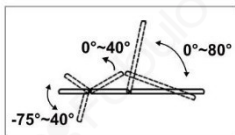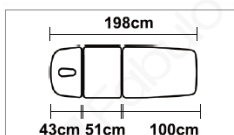

- Délka: 78"/198cm
- Šířka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37,5"/95cm
- Pěna: 2,5" / 6,5 cm pevná pěna s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavení opěrky hlavy: -75°~40°
- Pneumatické nastavení opěradla: 0-80°
- Elektrické nastavení středního zdvihu: 0-40°
- Pracovní kapacita: 440 liber/200 kg




Fabulo Nexus XR1

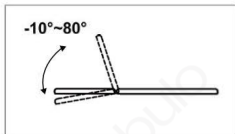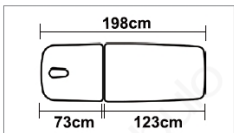

- Délka: 78"/198cm
- Šířka: 27"/69cm, 29"/74cm
- Výška: 21"/53cm~37,5"/95cm
- Pěna: 2,5" / 6,5 cm Pevná pěna s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavení opěradla: -10°-80°
- Pracovní nosnost: 440 liber / 200 kg

Specifikace:

Fabulo Nexus XA1

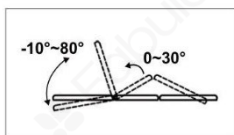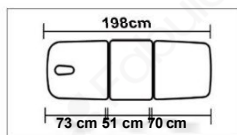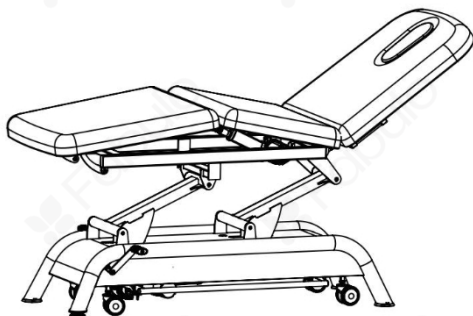


- Délka: 78"/198cm
- Šířka: 27"/69cm, 29774cm
- Výška: 21"/53cm~37.5795cm
- Pěna: 2,5"/6,5cm Pevná pěna s vysokou hustotou
- Pneumatické nastavení opěradla: -10°~80°
- Elektrický středový zdvih: 0-30°
- Pracovní nosnost: 440lbs/ 200kg

CZ

Návod k použití

Napájení


1. Vyměňte stůl z obalu a položte jej na rovný povrch.
2. Zapojte zástrčku napájecího kabelu stolu do elektrické zásuvky.
3. Před každým použitím otočte bezpečnostní pojistku do polohy "ON" (obr. 1), aby bylo možné připojení k napájení.

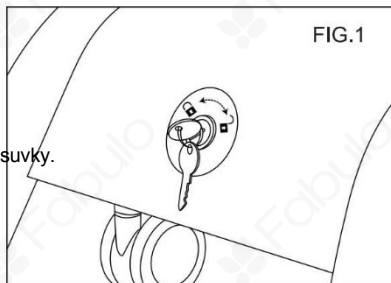


Připomínáme

- Bezpečnostní zámek smí instalovat pouze originální výrobce a uživatelé si jej nesmí instalovat soukromě.
- Po odchodu určeného lékaře nebo obsluhy odpojte napájení a vymějte klíč.

Ovládání výšky

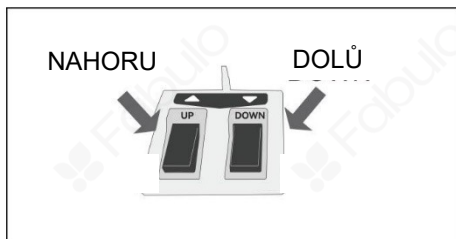

OBR.2

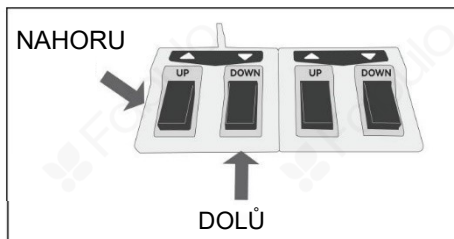


OBR.3


Ovládání nožním pedálem

Nožní ovládání slouží ke zvýšení nebo snížení výšky stolu podle obr. 2 nebo obr. 3.

Ovládání výšky

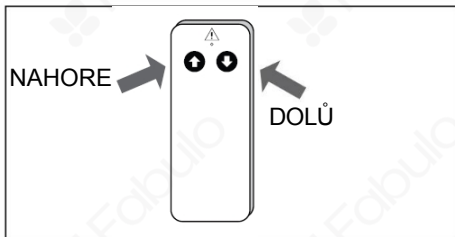

OBR.4

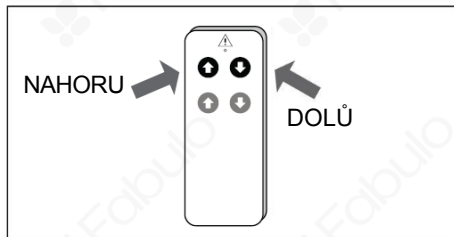


OBR.5

CS

Ruční ovládání

Pomocí ručního ovládání zvyšujete nebo snižujete výšku stolu podle obr. 4 nebo obr. 5.

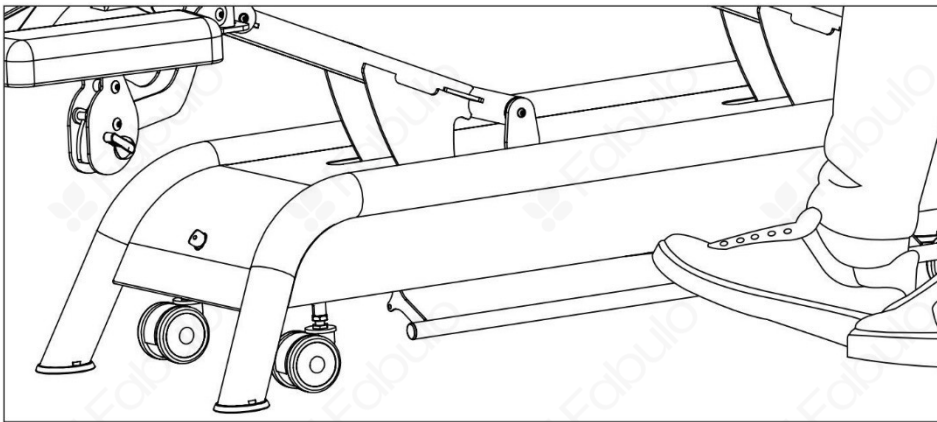

OBR.6


Nožní ovládání

K ovládní a nastavení výšky stolu lze použít systém nožního ovládání. Zatlacením přepážky dolů zvýšíte výšku stolu a zvednutím přepážky nahoru snížíte výšku lůžka (Obr. 6).

Nastavení úhlu střední části stolu

(K dispozici pro Fabulo Nexus XA1, Fabulo Nexus XF3)


CS

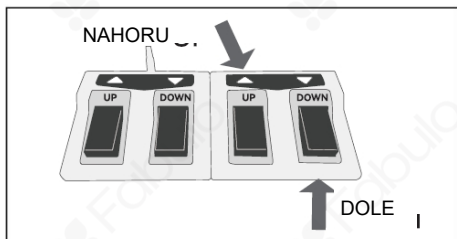

OBR.7

Ovládání nožním pedálem


Pomocí nožního pedálu nastavte úhel středního zdvihu podle obr. 7.

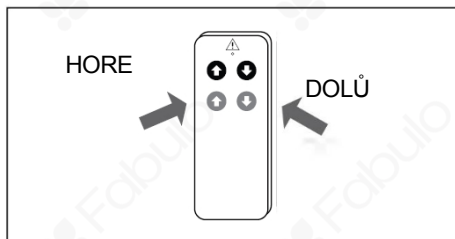

OBRÁZEK 8

Ruční ovládání

Ručním ovladačem nastavte úhel středního zdvihu podle obr. 8.

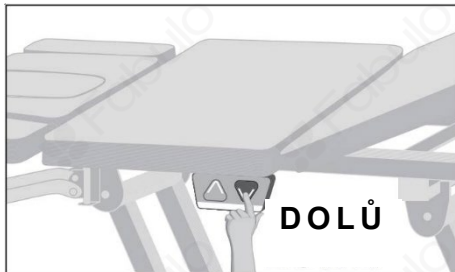


Ovládání na bočním panelu

K nastavení úhlu středního zdvihu lze použít ovládání na bočním panelu. Stisknutím tlačítka "NAHORU" úhel stolu zvýšíte a stisknutím tlačítka "DOLŮ" jej snížíte. Jakmile je povrch stolu v požadovaném úhlu, tlačítko uvolněte.


Návod k použití

Nastavení přední opěrky

Zvedněte loketní opěrku do požadované výšky (Obr. 9) a poté ji snižte otočením spouštěče na boku konzoly směrem nahoru. (OBR. 10)

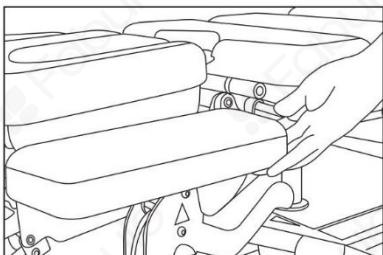

OBRÁZEK 9

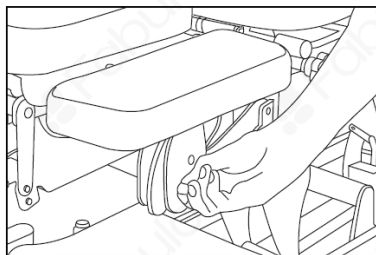

OBRÁZEK 10

CS

Zvedněte přední loketní opěrku směrem nahoru a otočením nastavte její polohu podle obrázku 11.


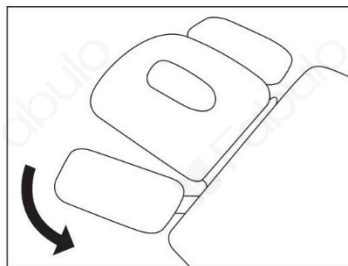


FIG.11

Nastavení otočné prodloužené boční loketní opěrky

Uchopte boční loketní opěrku a posunutím do strany ji snižte.

Uchopte boční loketní opěrku, zvedněte ji na kovovou plošinu a položte ji na ni. (OBRÁZEK 12)

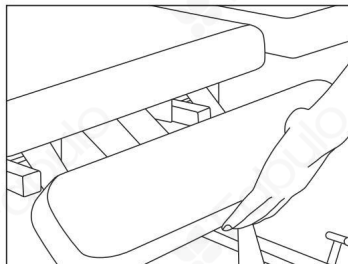

OBRÁZEK 12

Návod k použití

CS

Nastavení úhlu opěrky hlavy

Uchopte rukojeť pod částí opěrky hlavy, zvedněte nebo spusťte ji do požadovaného úhlu a poté ji uvolněte.

(OBRÁZEK 13)



FIG.13

Nastavení úhlu opěrky nohou

Jednou rukou zatáhněte za libovolnou páčku pod částí opěrky nohou stolu a druhou rukou přidržíte horní část stolu. Zvedněte nebo spusťte ji do požadovaného úhlu a poté ji uvolněte. (OBR. 14)

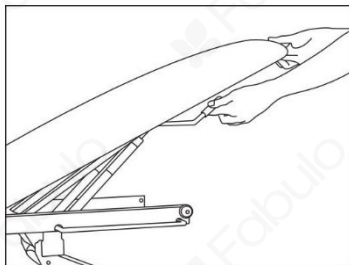



FIG.14

Otočné kovové zábradlí (volitelné příslušenství)

Spusťte zábradlí: zatáhněte za kolík na předním konci kovového zábradlí a sklopte jej dolů, dokud nebude kolmo k povrchu lůžka. Zasuňte kolík zpět a zajistěte kovové zábradlí. (Obrázek 15)

Instalace zábradlí: Vytáhněte kolík na předním konci kovového zábradlí, otočte zábradlí nahoru, dokud nebude kolmo k povrchu lůžka, a otočte kolíkem nahoru.

EK 15 zasuňte zpět, abyste kovové zábradlí zajistili na místě. (Obrázek 15)

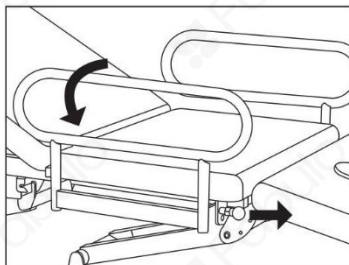

OBR.15

Systém pohotovostních koleček

Pohyb stolu

Zatlačte nohou na tyč, aby se uvolnila čtyři kolečka, a poté stůl přesuňte na rovný povrch. (OBRÁZEK 16)

Během provozu dávejte pozor na nohy.

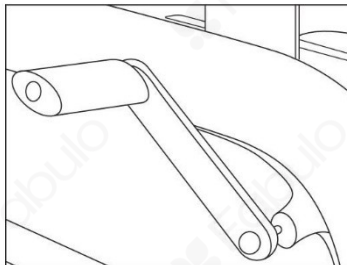


FIG.16

CS

Záruka

Rám stolu	Pohon	Příslušenství	Čalounění	Pneumatické čerpadlo
Záruka 5 let	3letá záruka	2letá záruka	2letá záruka	Záruka 1 rok

- Všechny záruky jsou omezeny na náhradní díly z výroby, opravu nebo výměnu z výroby, pokud výrobek nebyl vrácen na vaše náklady.
- Tyto záruky představují celou poskytovanou záruku. Neexistují žádné jiné záruky ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané.
- Tato záruka se vztahuje pouze na mechanické poruchy, které se vyskytnou při běžném používání. Na jakékoli umělé poškození, neoprávněnou úpravu, nesprávnou přepravu, nesprávné použití, zneužití nebo použití nad rámec tohoto návodu se záruka již nevztahuje.

Bezpečnostní pokyny

Tento elektrický terapeutický stůl řady Fabulo Nexus odpovídá bezpečnostním předpisům. Nesprávné používání může způsobit poškození lidského těla, předmětů a výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném provozu a správném používání, které chrání lidské tělo před zraněním a zabraňují poškození výrobku. Pokud během používání dojde k následujícím stavům, výrobce nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za zranění osob, škody na majetku, poškození výrobků a jiných předmětů.

Bezpečnostní pokyny

- Uživatel je mladší 18 let
- Používání nad rámec funkčnosti výrobku
- Pacient je tělesně nebo smyslově postižený nebo má nízkou inteligenci a chybí mu zkušenosti nebo příslušné znalosti.
- Nesprávné použití
- Zvedání předmětů, které přesahují nosnost výrobku
- Přemísťování a přeprava s použitím vadných nebo neúčinných ochranných zařízení
- Neoprávněné změny konstrukce zařízení
- Pokračování v používání výrobku po zjištění poškození konstrukce
- Nesprávná údržba
- Vnější katastrofy a vyšší moc
- Vystavení zařízení extrémnímu chladu, teplu, slunečnímu záření a vlhkosti

Elektrická nebezpečí

- Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej vyměňte, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení na mokré podlaze nebo ve vlhkém prostředí. Okolní teplota by se měla pohybovat mezi 10 °C a 30 °C.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde jsou přítomny hořlavé nebo výbušné plyny nebo páry.

Riziko nehod

- Za žádných okolností neumísťujte do konstrukce žádné předměty ani části těla, abyste zabránili poškození předmětů nebo zranění v případě neočekávaného zvednutí nebo zřícení zařízení.
- Nestůjte na zařízení, abyste zabránili jeho pádu nebo převrácení.

Péče o pokožku

- Abyste zabránili popraskání koženého potahu matrace, vyhněte se vlhkému prostředí, vodě na povrchu lůžka a chladnému nebo přehřátému prostředí.
- Čistěte neutrálním čisticím prostředkem; důkladně otřete a osušte.
- Zabraňte kontaktu ostrých nebo tvrdých předmětů s koženým povrchem.